

ИНСТРУКЦИЯ № 10/21

по применению дезинфицирующего средства «Дезактив Септик»

(ООО «Дезснаб-Трейд», Россия)

Инструкция разработана:

Авторы: Быкова И. А., Кочетовская О. С., Свистунова И. Н.

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических организаций (ЛПО), в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи, клинических, иммунологических, ПЦР и микробиологических лабораторий, детских учреждений, объектов социального обеспечения, пенитенциарных учреждений, силовых ведомств, организаций коммунально-бытового назначения, в том числе оказывающих парикмахерские и косметологические услуги, гостиниц, общежитий, санпропускников, бань, саун, прачечных, общественных туалетов, служб водоканала и энергосети, торговых предприятий и предприятий общественного питания, развлекательных и выставочных центров, объектов транспорта, в т.ч. автотранспорта по перевозке пищевых продуктов, пассажирского автотранспорта, промышленных предприятий, в том числе химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, для применения населением в быту.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости или с цветом применяемого красителя с характерным запахом спирта и (или) применяемой отдушки.

В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 70%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид- 0,1%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,1%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, подготовленную воду.

Срок хранения, при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня изготовления в плотно закрытой упаковке производителя.

1.2. Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза – тестировано на *Mycobacterium terrae*, возбудителей внутрибольничной инфекции (ВБИ) – тестировано на *Pseudomonas aeruginosa*); кишечных инфекций – *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, метициллин-резистентного стафилококка и ванкомицин-резистентного энтерококка, всех известных вирусов – патогенов человека (в том числе рино-, коро-, рото-, аденовирусов, вирусов энтеральных и парентеральных), гепатитов, включая гепатиты А, В, С, D; полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа, в т.ч. «свиного» H1N1 и «птичьего» H5N1, парагриппа, коронавирусов, возбудителя «атипичной пневмонии» (SARS, MERS), герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и т.д., фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение не менее 6 часов. Средство не требует смывания после обработки.

1.3. По параметрам острой токсичности средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» при введении в желудок и нанесении на кожу, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу мало опасных веществ. При введении в брюшину средство относится к 4 классу мало токсичных веществ по классификации К.К. Сидорова. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Кумулятивный эффект отсутствует. Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза. По степени ингаляционной опасности в рекомендуемых режимах применения средство относится к 4 классу малоопасных веществ.

ПДК в воздухе рабочей зоны для: изопропилового спирта - 10 мг/м³ (пары, 3 класс опасности); алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м³ (аэрозоль, 2 класс опасности).

дицеллдиметиламмоний хлорида - 1 мг/м³ (аэрозоль, 2 класс опасности).

1.4. Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» в виде бесцветной жидкости применяется:

в учреждениях здравоохранения, включая лечебно-профилактические, амбулаторно-поликлинические и стационарные лечебные учреждения, санатории, профилактории, реабилитационные центры, медицинские многопрофильные центры, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, родильные стационары, отделения новорожденных, неонатальные центры и отделения, детские отделения, стоматологические клиники и отделения, эндоскопические и колоноскопические отделения, медицинские кабинеты и медпункты различных учреждений, кабинеты диагностики, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые центры, центры по трансплантации органов, станции переливания и забора крови, противотуберкулезные учреждения, кожно-венерологические диспансеры, микологические и др.; на санитарном транспорте всех видов, в т.ч. в условиях транспортировки в машинах скорой помощи; в учреждениях дезинфекционного профиля, включая санпропускники; в лабораториях (в т.ч. бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, клинических, диагностических и др.); в аптеках и аптечных учреждениях; в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; в инфекционных очагах; в учреждениях и ведомствах: МЧС, МВД, личного состава войск и формирований ГО; объектах водоканала и энергосети, военных ведомств, пенитенциарных учреждениях и др.; на предприятиях парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности, на ветеринарных объектах, птицеводческих, животноводческих, звероводческих хозяйствах; на предприятиях пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая, хлебопекарная, кондитерская и др.); на предприятиях общественного питания, промышленных рынков, торговли; в детских дошкольных и школьных учреждениях, административных объектах, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и др.), учреждениях образования, культуры, спорта; санаторно-курортных учреждениях; на всех видах транспорта, включая транспорт для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья; на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (включая гостиницы, общежития, общественные туалеты, и др.), сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны, солярии, маникюрно-педикюрные кабинеты, фитнес-центры, бассейны, бани и др. оздоровительно комплексы), в торгово-развлекательных центрах, промышленных рынках, предприятиях розничной торговли; на объектах ритуальных услуг, моргов и т.д.

Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, на санитарном транспорте, станциях скорой и неотложной медицинской помощи; работников лабораторий (в т.ч. бактериологических, микологических, вирусологических, иммунологических, клинических, криминалистических и др.), донорских пунктах, пунктах переливания крови, в медико-санитарных частях; работников аптек и аптечных заведений;

- гигиенической обработки рук работников детских школьных и дошкольных учреждений, парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий, в зонах чрезвычайных ситуаций, в пенитенциарных учреждениях, на объектах коммунально-бытовых служб (в т.ч. парикмахерских, косметических салонов, салонов красоты, СПА-салонов, банно-прачечных комплексов, объектов гостиничного хозяйства и пр., объектов служб ритуальных услуг, моргов, общественного транспорта, на предприятиях общественного питания, молочной кухни, рынков, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и

звероводческих хозяйств, предприятий торговли (в т.ч. кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами);

- обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств, в медицинских организациях (в том числе стоматологических организациях, а также при приеме родов в родильных домах и др.);

- обработки кожи инъекционного поля пациентов, в т.ч. при проведении прививок;

- обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания и забора крови и др.;

- обработки кожи операционного поля, в т.ч. при катетеризации и пункции суставов и органов (в т.ч. лечебных и диагностических пункций, катетеризаций периферических и центральных сосудов, спинномозговых функций, катетеризаций эпидурального пространства, пункций суставов), проведением проколов, рассечений, биопсии в ЛПУ, медицинских кабинетах различных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, и др.), санаторно-курортных учреждениях, пенитенциарных и других учреждениях, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях.

- частичной санитарной обработки кожных покровов включая лежащих больных;

- обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний после посещения бань, душевых, саун, бассейнов; профилактической обработки ступней ног представителей силовых ведомств системы РСЧС, спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО, взрослых людей, находящихся в пенитенциарных учреждениях;

- обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала, в т.ч. в случае попадания на перчатки инфекционного материала; при сборе медицинских отходов; а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию;

- В качестве **дезинфицирующего средства** используется для применения в условиях, требующих быстрого обеззараживания и высыхания поверхностей, устойчивых к действию спиртов, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, различного профиля, в т.ч. стоматологических кабинетах, приемных отделениях, реанимационных, операционных, офтальмологических, детских стационаров, роддомах и акушерских клиниках (включая отделение неонатологии, палаты для новорожденных, отделения экстракорпорального оплодотворения), перевязочных, смотровых кабинетах амбулаторного приема, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, изоляторах, боксах; в диагностических, клинических, микробиологических и других лабораториях; в машинах скорой медицинской помощи, служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте; в детских дошкольных, школьных учреждениях, пенитенциарных учреждениях, на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, общественного питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, в ветеринарных учреждениях, на объектах коммунально-бытового хозяйства (парикмахерские, массажные и косметические салоны, салоны красоты, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения, прачечные, морги и др.), объектах спортивно-оздоровительного назначения (бассейны, бани, сауны и др.), объектах спортивно-оздоровительного назначения (бассейны, бани, сауны и др.) **с целью экспресс-дезинфекции:**

- небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях (пол, стены и др.);

- предметов обстановки (в том числе операционных, бактерицидных ламп и прочей осветительной аппаратуры), жесткой и мягкой мебели (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных, процедурных, секционных столов, гинекологических и стоматологических кресел, реанимационных матрасов, матрасов в чехлах в отделениях и др.), каталок и носилок, подголовников и подлокотников, поручней, деревянных и оконных ручек, решеток кондиционеров и т.п., санитарно-технологического оборудования, спортивного инвентаря, средств личной гигиены;

- поверхностей приборов и аппаратов, в т.ч. панелей управления медицинского оборудования, внешних поверхностей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оборудования для анестезии и гемодиализа, наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок, медицинских термометров, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртосодержащими среасами;

- небольших поверхностей в помещениях жесткой мебели, поверхностей приборов и аппаратов в очагах инфекционных заболеваний.

- поверхностных (накожных) датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п) и других аналогичных медицинских изделий, допускающих обеззараживание способом протирания;

- поверхностей лабораторной мебели и оборудования в клинических, микробиологических,

вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка иммерсионного масла);

- предметов ухода за больными, игрушек из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл и др.);
- оборудования и поверхностей в машинах скорой помощи и на санитарном транспорте;
- физиотерапевтического оборудования;
- кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений);
- изделий медицинского назначения (кроме хирургических ИМН, а так же ИМН, имеющих полости и каналы) из различных материалов (металла, стекла, пластмассы, резины), включая медицинские тонометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стетоскопы, фонендоскопы и светфонендоскопы, стоматологические инструменты (кроме вращающихся), стоматологические наконечники;
- небольших поверхностей, объектах в моргах и здания патологоанатомических служб, учреждения судебно-медицинской экспертизы; в колумбариях, похоронных бюро и бюро-магазинах. дома траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организации, оказывающих ритуальные услуги, а так же для обработки автокатафалков.
- небольших помещениях и оборудования на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D.
- поверхностей соляриев, устойчивых к воздействию спиртов, специальных парикмахерских, маникюрных, педикюрных инструментов и насадок, не подлежащих стерилизации (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»), в парикмахерских, косметических салонах, салонах красоты и прочих организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги;
- резиновых и полипропиленовых ковриков, клеенчатых подстилок;
- внутренней поверхности обуви (из резины и пластика) с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- мониторов (кроме ЖК-экранов), комплектующих устройств компьютеров (клавиатур, микрофонов, принтеров и т.п.), телефонных аппаратов (мобильных телефонов, ксероксов и другой оргтехники);
- счетчиков банкнот и монет, детекторов валют и акцизных марок, уничтожителей документов, архивных шкафов и стеллажей;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры, воздухопроводы, вентиляционные фильтры и др.);
- использования населением в быту с целью очистки и дезинфекции, небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обихода (взрослые и дети старше 10 лет). гигиенической обработки рук взрослых и детей старше 10 лет.

• 1.5. Окрашенное в цвет красителя, средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для визуализации обработанной поверхности кожи пациента:

- для обработки кожи и обозначения границ операционного и инъекционного полей пациентов в медицинских учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций;

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. *Гигиеническая обработка рук:* на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 1-2 мл средства и втирают его в кожу до высыхания, но не менее 10 секунд, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей.

Для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций средство на кисти рук наносят однократно, используя не менее 5 мл средства, общее время обработки - не менее 1 минут.

2.2. *Обработка рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении операции:* перед применением средства кисти рук и предплечий предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем средство наносят на сухие руки двукратно порциями (от 2 мл до 3 мл), обработку проводят, поддерживая кожу рук во влажном состоянии, втирая каждую порцию в кожу обеих кистей рук и предплечий до полного высыхания в течение 2.5 минут. Общее время обработки 5 минут. Стерильные перчатки надевают на сухие руки, после полного высыхания средства.

Средство проявляет пролонгированное антимикробное (остаточное) действие в течение 6 часов.

2.3. *Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров, коленных и плечевых суставов перед введением катетеров:* кожу протирают двукратно отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки не менее 1 минуты.

2.4. *Обработка инъекционного поля, в том числе место прививки:*

- кожу протирают стерильным ватным тампоном (в одном направлении), обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - не менее 20 секунд;

- при обработке кожных покровов на месте инъекции способом орошения средство распыляют до полного увлажнения с последующей выдержкой после окончания обработки не менее 20 секунд (до полного высыхания средства).

2.5. *Обработка запаянных стеклянных ампул (флаконов) перед проведением инъекций:* верхнюю треть запаянной ампулы протирают стерильным влажным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - не менее 20 секунд.

2.6. *Профилактическая обработка ступней ног* (после посещения бассейна, сауны, душевой и др.): тщательно протереть кожу каждой ступни ног разными ватными тампонами, обильно смоченными средством «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК». Время обработки каждой ступни разными тампонами - не менее 1 минуты. Для профилактики грибковых заболеваний время дезинфекционной выдержки - 3 минуты.

2.7. *Обработка перчаток и изделий из латекса, нитрила, винила и др.,* для обеззараживания поверхности перчаток в сжатую ладонь руки в перчатке наносят 2,5 мл средства. Затем в течение 15 секунд протирают этой порцией средства поверхность перчаток обеих рук, совершая движения рук, которые выполняют при обработке кожи рук антисептиком или обрабатывают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством. Общее время обработки - 30 секунд. Время дезинфекционной выдержки - не менее 1 минуты при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях и не менее 3 минут при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях.

При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе их снятия, необходимо снять загрязнения ватным тампоном, обильно смоченным средством, а затем провести обработку как указано выше.

После обработки средством «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» перчатки необходимо снять с рук и направить на утилизацию, а затем провести гигиеническую обработку рук средством «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК».

2.8. *Дезинфекция небольших по площади твердых поверхностей и предметов обстановки в помещениях* проводится способом протирания или орошения. Норма расхода средства при протирании - 50 мл/м². Обработка проводится однократно или двукратно. Максимально допустимая для обработки площадь должна составлять не более 1/10 от общей площади помещения (например в помещении 10 м² обеззараживаемая поверхность должна быть не более 1 м²). Поверхности, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудование равномерно орошают средством до полного смачивания или протирают салфеткой обильно смоченной средством по режимам таблицы 1.

Поверхности, подлежащие дезинфекции, должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей плоскости. Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхности. Поверхности можно использовать после полного высыхания средства. В случае необходимости поверхности можно протирать стерильными марлевыми салфетками по истечению времени дезинфекции, не дожидаясь их высыхания.

Средство не рекомендуется применять для обработки поверхностей, покрытых низкосортными или спирторастворимыми красками и лаками, из органического (акрилового) стекла и других материалов, не устойчивых к воздействию спирта.

Перед применением рекомендуется проверить действие средства на небольшом малозаметном участке поверхности.

При наличии биологических загрязнений (органических и др.) на обрабатываемые поверхности необходимо одной салфеткой, обильно смоченной средством, удалить загрязнение, а другой провести повторную обработку по режимам, представленным в таблице 1. Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

2.9. *Дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов, физиотерапевтического оборудования, диагностического оборудования, не предназначенного для инвазивного вмешательства и не контактирующего непосредственно со слизистой пациента (датчики аппаратов УЗИ, маммографы, кардиоэлектроды, др.), фонендоскопов и стетоскопов* проводят способом протирания салфеткой, обильно смоченной средством. Режимы дезинфекции представлены в таблице 1. При наличии биологических выделений обработка проводится в два этапа, согласно пункту 2.8.

2.10. Предметы ухода за больными, игрушки и другие объекты из непористых, гладких материалов (подкладные клеенки, грелки и т.п.) не загрязнённых биологическими выделениями, протирают салфеткой, обильно смоченной средством, по режимам указанным в таблице 1.

При наличии биологических выделений обработка проводится в два этапа, согласно п.2.8.

2.11. Дезинфекцию поверхностей кузезов проводят согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и рекомендациям производителей кузезов.

Дезинфекцию кузезов разрешенных производителем к обработке спиртосодержащими средствами, проводят в отдельном хорошо проветриваемом помещении в отсутствие детей. Средство наносят на обрабатываемую поверхность в виде спрея с помощью ручного распылителя на расстоянии 30 см до полного смачивания или с помощью салфеток, обильно смоченных средством, и оставляют на время дезинфекционной выдержки. По окончании выдержки поверхности кузезов дважды протирают стерильными тканевыми салфетками (пеленками), обильно смоченными стерильной водой. После каждого промывания поверхности кузеза вытирают насухо стерильными тканевыми салфетками (пеленками). После окончания обработки кузезы следует проветрить в течение 10 минут.

2.12. Дезинфекцию обуви из натуральной и искусственной кожи, пластика, резины с целью профилактики грибковых заболеваний осуществляют двумя салфетками (на одну пару обуви), обильно смоченными средством, или равномерным орошением средством с расстояния не менее 30 см с помощью ручного распылителя до полного смачивания поверхности, при времени дезинфекционной выдержке-2 минуты.

По окончании дезинфекции смывания средство не требует. Перед использованием обувь необходимо просушить.

2.13. Дезинфекцию поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов в очагах чумы, холеры, туляремии проводят по режимам для особо опасных инфекций, представленным в таблице 1, с учетом рекомендаций пункта 2.8.

2.14. В парикмахерских, банях, саунах, бассейнах, спортивных комплексах, косметических салонах дезинфекцию проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (таблица 1).

2.15. Дезинфекцию объектов автотранспорта скорой помощи и служб ГО и ЧС, санитарного транспорта проводят орошением или протиранием салфетками, обильно смоченными средством. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Дезинфекцию проводят при соответствующих инфекциях, а не при инфекции неясной этиологии - в режимах, рекомендованных для вирусных инфекций (таблица 1).

Профилактическая обработка проводится по режиму при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

2.16. Обеззараживание поверхностей и объектов в моргах, зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, осуществляется средством по режимам таблицы 1.

Автокатафалки обрабатывают по режимам санитарного транспорта (п. 2.15)

2.17. Поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования воздуха, поверхности вентиляторов и конструктивных элементов систем вентиляции помещений орошают средством, с последующим протиранием или протирают салфеткой, обильно смоченной средством (нормы расхода указаны в п. 2.8) по режимам таблицы 1.

Таблица 1. Режимы дезинфекции различных объектов средством «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК»

Объект обеззараживания	Вид инфекции	Время обеззараживания минут	Способ обеззараживания
Небольшие по площади поверхности помещения, предметы обстановки, жесткая мебель, объекты санитарного транспорта и пр.	Бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые (кандидозы)	1	Протирание или орошение
	Дерматофитии	3	Протирание или орошение
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные и грибковые (кандидозы, дерматофитии)	5	Протирание или орошение

Поверхности медицинских приборов и оборудования (датчики УЗИ, маммографы, физиотерапевтическое оборудование, фонендоскопы, стетоскопы и т.п.), стоматологические наконечники	Бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые (кандидозы)	1	Протирание или орошение
	Дерматофитии	3	Протирание или орошение
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные и грибковые (кандидозы, дерматофитии)	5	Протирание или орошение
Предметы ухода за больными (термометры, судна, подкладные клеенки, грелки и др.) их непористых материалов, игрушки	Бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые (кандидозы)	1	Протирание или орошение
	Дерматофитии	3	Протирание или орошение
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные и грибковые (кандидозы, дерматофитии)	5	Протирание или орошение
Поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования воздуха, поверхности вентиляторов и конструктивных элементов систем вентиляции помещений	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные и грибковые (кандидозы, дерматофитии)	5	Протирание или орошение

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Лица с хроническими аллергическими реакциями, и беременные женщины к работе со средством не допускаются.

3.2. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить!

3.3. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в местах, недоступных детям.

3.4. Средство использовать только по назначению непосредственно из оригинальной упаковки.

3.5. Не использовать для обработки ран и слизистых оболочек.

3.6. Избегать попадания раствора средства в глаза.

3.7. По истечении срока годности, а также при неправильном хранении использование запрещается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует тщательно промыть проточной водой и закапать 1-2 капли 20 - 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

4.2. При проявлении на коже раздражения, сыпи - прекратить применение средства, руки вымыть водой с мылом.

4.3. При случайном попадании средства в желудок - прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту. Затем принять адсорбент. При необходимости обратиться к врачу.

4.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Дать теплое питье. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Средство в потребительской таре упаковывается в ящики из гофрокартона или транспортируется в полимерных кубах.

5.2. Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» транспортируют всеми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары. Температура транспортирования от минус 40°C до плюс 40°C.

5.3. Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» хранить в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, при температуре -20С до +30С вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

5.4. В аварийной ситуации: при случайной утечке большого количества средства засыпать его песком или землей (не использовать горючие материалы, например, опилки, стружку) собрать в емкость с крышкой для последующей утилизации. Остаток смыть большим количеством воды.

5.5. **Меры защиты окружающей среды:** не допускать попадания неразбавленного средства в сточные / поверхностные или подземные воды и в канализацию.

5.6. Срок годности средства - 5 лет с даты изготовления, при хранении в плотно закрытой упаковке производителя.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Средство дезинфицирующее «Дезактив Септик» представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость светло-желтоватого цвета с запахом отдушки в виде концентрата. Контроль качества осуществляют по показателям, указанным в таблице.

Показатели и нормы для средства дезинфицирующее «Дезактив Септик» Таблица.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Внешний вид средства	Прозрачная бесцветная жидкость или с цветом применяемого красителя	По ГОСТ 29188.0 и по п. 6.2.
2. Запах	характерный запах спирта или применяемой отдушки	По п. 6.2.
3. Массовая доля изопропилового спирта, %	70,0±2,0	По п. 6.4.
4. Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, %	0,1±0,01	По п. 6.3.
5. Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида – %	0,1±0,01	По п. 6.3.

6.2. Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют визуально. Пробирку из бесцветного стекла диаметром 50 мм, заполняют средством и просматривают в проходящем свете на белом фоне. Запах оценивают органолептический.

6.3. Определение суммарной массовой доли четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмония хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида). Методика основана на методе двухфазного титрования. Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного стандартного раствора (натрий лаурилсульфат) при добавлении смешанного индикатора из катионного красящего вещества (эозин БА и эозин

Н) и анионного красящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

6.3.1 Средства измерений, оборудование

- Цилиндр мерный со шлифом вместимостью 25 мл; 250 мл
- Колбы мерные вместимостью 250 мл, 1000 мл
- Бюретка вместимостью 25 мл,
- Пипетки вместимостью 1 мл; 10 мл; 20 мл

6.3.2. Реактивы

- Натрий додецилсульфат градации для двухфазного титрования (фирма «МЕРК»)
- Метиленовый голубой (индикатор);
- Эозин БА или эозин Н
- Хлороформ ч.д.а.
- Кислота серная, ч.д.а.; 2,5 М раствор
- Кислота уксусная ч.д.а.
- Вода деминерализованная или дистиллированная

6.3.3. Растворы-

Приготовление 0,005 м раствора натрий додецилсульфат: 1,442 г натрий додецилсульфат, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл и дополняют объем до калибровочной метки.

- Приготовление раствора смешанного индикатора:

Раствор А: 1,4 г эозина БА или эозина Н растворяют в 10 мл воды в мерной колбе вместимостью 500 мл, приливают 5 мл уксусной кислоты, доводят объем раствора этиловым спиртом до метки и перемешивают

Раствор Б: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 мл воды в стакане вместимостью 400 мл, прибавляют 30 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают.

Растворы А и Б хранят в отдельных склянках.

Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора Б прибавляют равные четыре части раствора А и перемешивают. Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед проведением анализа в необходимом количестве.

6.3.4. Проведение анализа

В мерную колбу вместимостью 250 мл помещают около 1,2 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. 20 мл приготовленного раствора дозируют с помощью пипетки в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 250 мл, прибавляют 4 мл воды, 20 мл хлороформа, 5 мл 0,1 н серной кислоты, 1 мл свежеприготовленного раствора смешанного индикатора и титруют стандартным раствором натрий додецилсульфата. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата цилиндр закрывают притертой пробкой и интенсивно встряхивают. Титрование проводят до окрашивания хлороформного слоя в зелено-голубой цвет.

6.3.5. Обработка результатов

Массовую долю ЧАС (X, %) вычисляют по формуле:

$$X = 0,001805 \cdot V_1 \cdot V_2 \cdot 100 / V_3 \cdot m,$$

где 0,001805 - средняя масса алкилдиметилбензиламмония хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно $C(C_{12}H_{25}SO_4Na) = 0,005$ моль/л, мг;

V_1 - объем титранта - раствора натрий додецилсульфата концентрации точно

$C(C_{12}H_{25}SO_4Na) = 0,005$ моль/л, израсходованный на титрование, мл;

V_2 - объем раствора пробы после разведения, мл;

Vз - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;

m - масса пробы, г.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения 0,2%.

В случае превышения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 5\%$ для доверительной вероятности 0,95.

6.4 Определение массовой доли изопропилового спирта.

6.4.1. Оборудование, реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88 или аналогичный.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ Р 53228 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора. Бюксы, герметично закрываемые пробками.

Изопропанол, х.ч. для хроматографии, аналитический стандарт. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2. Подготовка к выполнению измерений

Заполнение колонки насадкой осуществляют по ГОСТ 14618.5 разд. 2.

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя	30 см ³ /мин.
Скорость водорода	30 см ³ /мин.
Скорость воздуха	300 см ³ /мин.
Температура термостата колонки	55°C
Температура детектора	150°C
Температура испарителя	160°C
Объем вводимой пробы	1,5 мкл

Время удерживания изопропилового

спирта - 3,2 мин.

6.4.3. Приготовление стандартного раствора.

В бюксе с герметичной пробкой с точностью до 0,0002 г взвешивают количества аналитического стандарта изопропилового спирта и дистиллированной воды, необходимые для получения раствора спирта с концентрацией изопропилового спирта около 70%. Отмечают величины навесок и рассчитывают точное содержание изопропилового спирта в стандартном растворе в массовых процентах.

6.4.4. Выполнение анализа

Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» и стандартный раствор хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

6.4.5. Обработка результатов.

Массовую долю изопропилового спирта (Y) в процентах вычисляют по формуле:

$$\frac{C_{СТ} \times S_x}{S_{СТ}}$$

где:

- $C_{СТ}$ концентрация изопропилового спирта в стандартном растворе, % масс;
 S_x площадь пика изопропилового спирта на хроматограмме испытуемого средства
 $S_{СТ}$ площадь пика изопропилового спирта на хроматограмме стандартного раствора

6.5. Определение показателей безопасности и эффективности

Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложенным в Руководстве Р. 4.2. 2643-10. «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности». Официальное издание. М. Роспотребнадзор. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011